

Verschleimte Atemwege?

Das Aerobika® hilft



Aerobika X

Aerobika 



**DAS Atemtherapiegerät
bei chronischen
Atemwegserkrankungen**

Leichteres Abhusten durch Aerobika®

Verschleimte Atemwege führen oft zu chronischem Husten und der Ansiedlung von Bakterien in der Lunge.

So kann Ihnen das Aerobika® helfen:

- *Löst den Schleim und befreit die Bronchien*
- *Verbessert die Lungenfunktion*
- *Verringert Atemnot und Hustenreiz*
- *Mit Inhalation kombinierbar*



Warum ist das Schleimlösen so wichtig?

Viele chronische Lungenerkrankungen gehen mit vermehrter Schleimbildung in den Atemwegen einher. Dies kann z.B. bei COPDisten, zu Exazerbationen führen, also einer Verschlechterung der Symptome. Denn häufig führt die starke Verschleimung in den Atemwegen dazu, dass der natürliche Selbstreinigungsprozess der Lunge nicht mehr richtig funktioniert und Viren und Bakterien leichtes Spiel haben. Solche akuten Verschlechterungen beschleunigen das Fortschreiten der Krankheit – und wirken sich negativ auf die Lungenfunktion und die Lebenserwartung aus. Der wichtigste Schritt ist also die Auslöser solcher akuten Verschlechterungen zu verringern. Hier hilft das Aerobika® Atemtherapiegerät:

Während man in das Aerobika® ausatmet spürt man einen leichten Widerstand. Dieser öffnet die Atemwege. Gleichzeitig erzeugt das Aerobika® während der Ausatmung gleichmäßige Schwingungen, die sich auf die Bronchien übertragen. Dadurch wird der Schleim sanft, aber effektiv gelöst und kann so leichter abgehustet werden.*

Durchbrechen Sie den Teufelskreis der Exazerbationen noch heute: mit dem Aerobika® Atemtherapiegerät!



Aerobika® gibt es auf Rezept!
Hilfsmittel-Nr. 14.24.08.0017

Rezept-Nr.	Arzt-Nr.	Datum:	Verfallsdatum/Verwendbar bis:
Rp. (Bitte Lesartener durchstreichen)			
1 Aerobika® OPEP Atemtherapiegerät / PZN 10383433			
Diagnose: Chronisch obstruktive Lungenerkrankungen (COPD, Lungenemphysem, CF, o.ä.) – unbedingt erforderlich u.a. zur Sekretmobilisation für Patienten mit eingeschränkter Lungenfunktion			
Abgabestadium		Unterschrift des Arztes	

Wie wirkt das Aerobika®?

Wirkt genau dort, wo sich die Probleme chronisch kranker
Lungenpatienten befinden.

VORHER


Verengte, stark verschleimte
Atemwege

HINTERHER

Die Atemwege
werden geöffnet

Vibrationen lockern
und verflüssigen
den Schleim

Dies kann dazu
führen, dass
inhalierete
Medikamente
besser wirken.

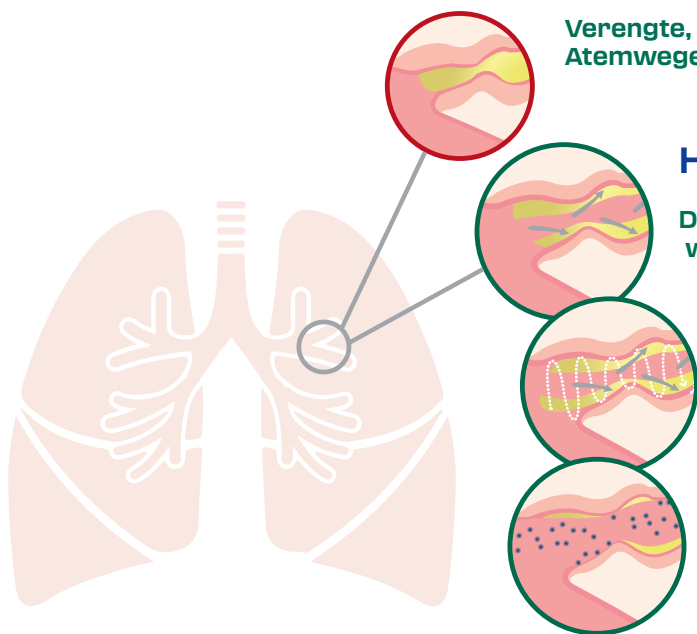


Wie wende ich das Aerobika® richtig an?

Die Anwendung ist sehr einfach und vor allem lageunabhängig, also im Stehen, Sitzen oder Liegen möglich.

Lippen um das Mundstück schließen


1

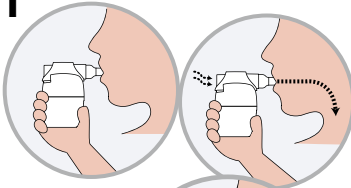

2 Einatmen und Atem für 2-3 Sekunden halten

3

Ausatmen - langsam, gleichmäßig

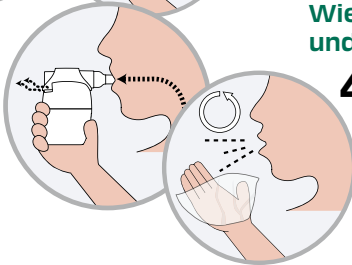

Wiederholen und abhusten

4



Anwendungsvideos

* Weitere Informationen und Studien auf: www.aerobika-atemtherapie.de





Lassen Sie sich jedes Jahr ein neues verordnen!

Um eine wirkungsvolle und hygienisch einwandfreie Atemtherapie zu gewährleisten wird die Verordnung eines neuen Aerobika® nach einem Jahr angeraten.

Denn durch die häufige Verwendung und Aufbereitung kann es beim Gerät zu Abnutzungserscheinungen kommen und somit die Therapieeffizienz beeinträchtigt werden.



BEZEICHNUNG

PZN

ARTIKEL-NR.

Aerobika® OPEP Atemtherapiesystem

10383433

M53120-00

MPV MEDICAL
Healthcare - we care.

Parsdorfer Weg 6
85551 Kirchheim b. München

Tel. +49 (0)89-7299 700-0
Fax +49 (0)89-7299 700-99

www.mpvmedical.com
info@mpvmedical.com

Stempelfeld